

먼저 서랍에서 아래 도구들을 찾아 준비해 주세요.




청소 키트




콜렛 너트




콜렛 토크렌치

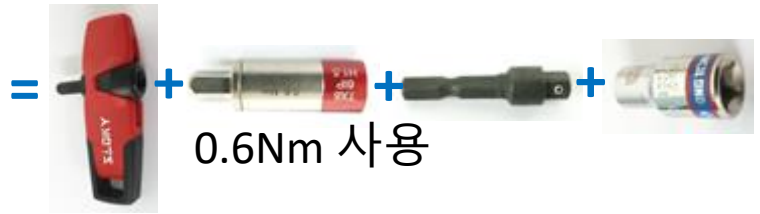


콜렛 분리 작업.

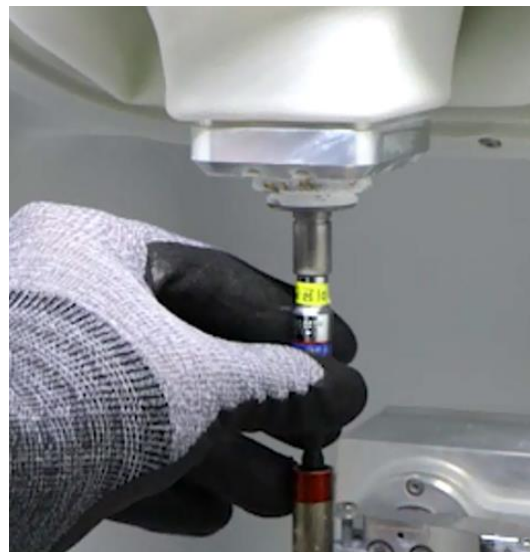

틀 버튼을 눌러서 틀을 빼고 토크 렌치를 끼워서 풀어 줍니다.
콜렛 토크렌치가 준비가 안되면 콜렛 너트로 풀으셔도 됩니다.

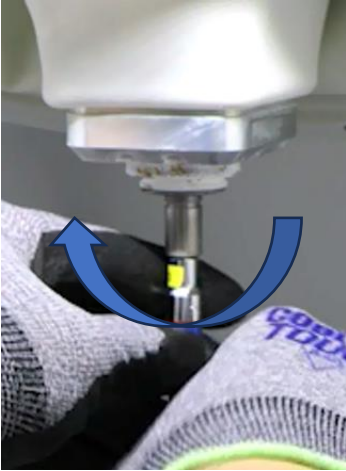

반시계 방향으로 콜릿을 풀어줍니다.
#위쪽 고정된 볼트를 풀어준다고 생각하시면 됩니다.

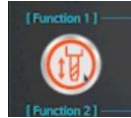

콜릿을 뺀후 스피들을 클램핑 시켜줍니다.




콜릿을 마른 천으로 닦은 뒤에 청소 키트에 들어있는 브러쉬로 콜릿 내외부를 청소합니다. 그뒤에 에어건으로 먼지를 제거합니다.



청소 키트안에 그리스를 조금 짜내어 콜릿 외면에 매우 얇게 발라 줍니다. 그리고 청소키트에 있는 하얀색 도구를 스피들 안쪽에 끼우고 돌려서 스피들 내부를 청소합니다.



틀 버튼을 눌러서 콜릿을 열어 주세요.

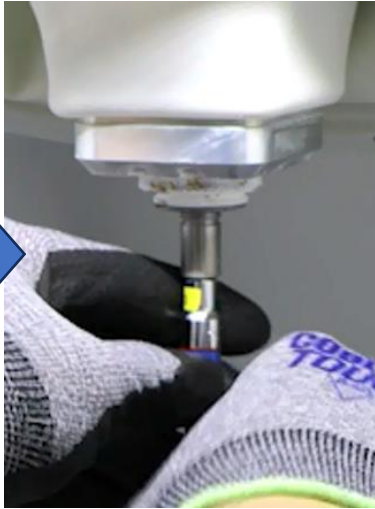

콜릿을 손으로 어느정도 놓은 뒤에 콜릿 토크렌치로 고정시켜줍니다.



장착이 완료되면 틀을 끼워서 클램핑과 언클램핑이 정상적으로 되는지 확인 후 작업을 마무리 합니다.